

この添付文書をよく読みご使用ください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

*2015年1月15日(第2版)

2009年1月10日(第1版)

医療機器届出番号:25B2X10004000054

医療用品(4)整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

ハイドロヘルプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

一度使用したものは再度使わないでください。

【形状・構造及び原理等】

(パッド)

レーヨン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、


天然高分子類

(粘着テープ)

ポリウレタンフィルム、シリコーン-アクリル系粘着剤

(セパレーター)

紙、シリコーン樹脂

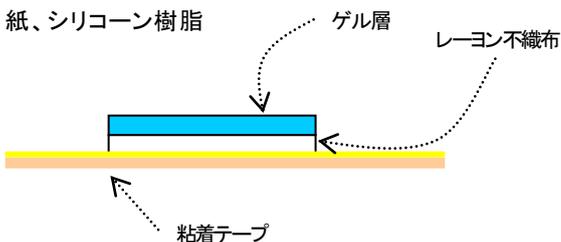

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護

【操作方法又は使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面に当て、テープで固定してください。

【使用上の注意】

1. 感染した傷には使用しないでください。また、傷が感染していると思われる場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
感染すると一般に傷口の周りが赤く、熱を持ち、腫れやズキズキとした痛みが続きます。膿を持っていることもあります。水道水や滅菌生理食塩水などで患部をよく洗い流してください。
2. 傷の周りを拭き、パッド部分を汚さないように注意して貼り付けてください。
3. 粘着面を傷に貼らないでください。

4. 本品の使用時、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合は、直ぐに使用を中止し、*医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 浸出液がもれたり、テープがはがれたりした場合は、直ぐに新しいものに貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
6. はがす時は急激に剥がしたりせず、皮膚を傷めないようにゆっくりとはがしてください。
7. 個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。
8. 品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【貯蔵方法及び品質保持期限等】

1. 直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。

【包装】*

22mm×72mm	10枚入り小箱包装
22mm×72mm	12枚入り小箱包装
38mm×60mm	8枚入り小箱包装
38mm×60mm	8枚入り袋包装
38mm×60mm	7枚入り小箱包装
38mm×60mm	6枚入り小箱包装
55mm×75mm	6枚入り小箱包装
55mm×75mm	6枚入り袋包装
55mm×75mm	5枚入り小箱包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008

問い合わせ先 (TEL)0748-52-5780