

**2025 年 3 月改訂（第 5 版）

*2017 年 4 月改訂（第 4 版）

医療機器届出番号 25B2X10004000055

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

トーヨーバン通気タイプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

パッド : セルロース繊維、ポリエステル、ポリエチレン芯鞘複合繊維、ポリエチレン
粘着テープ : ウレタン不織布、アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、ポリエチレン、シリコーン樹脂

*【使用目的又は効果】

創傷面の保護

*【使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面に当て、テープで固定してください。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・創傷面を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・貼付時はテープ部分を伸ばさないように貼ってください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れたり汚れたりしたまま放置すると、傷の治りが悪くなりますので、新しいものに貼り替えてください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・1日に2～3回を目安に貼り替えてください。一度はがしたものを再使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間の貼付を避け、はがす時はゆっくりはがしてください。

**【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・品質保持期限が過ぎたものは使用しないでください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780