

**2016 年 9 月改訂（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2014 年 1 月改訂（第 3 版）

医療機器届出番号 25B2X10004000056

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

防水リバン

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【**形状・構造及び原理等】

パッド : ポリエチレン、ポリオレフィン、レーヨン
粘着テープ : ポリウレタンフィルム、ナイロン、アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコン樹脂

【**使用目的又は効果】

創傷面の保護

【**使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面に当て、テープで固定してください。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので貼り替えてください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が現われた場合には、使用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・1日**2～3回、貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼付したり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【**保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【**製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780