

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

カットバン®HC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

一度使用したものは再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】


本品は、ウレタンフィルムを貼り合わせたウレタン不織布にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープとハイドロコロイドパッドからなる救急絆創膏です。

パッド：ハイドロコロイド

添加物として多糖類、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体

粘着テープ：ウレタン不織布及びウレタンフィルム、アクリル系粘着剤

セパレーター：紙、シリコーン樹脂

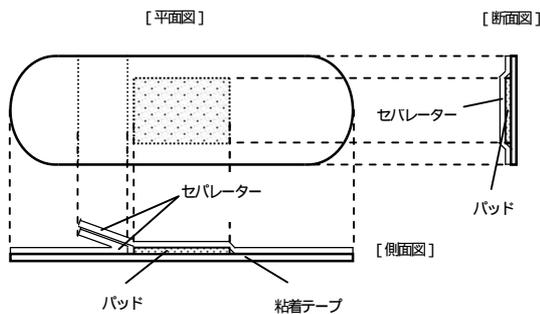

* パッドに茶または黒い粒が見られるときがありますが、原料成分であり品質及び安全性に問題はありません。

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護

【品目仕様等】

線滅菌済み

【正しい使い方又は使用方法等】

1. 傷が感染していないことを確認してください。
2. 傷口を水道水や滅菌生理食塩水でよく洗い、傷の周りの水分をしっかりと拭いてください。
* 殺菌・消毒剤を使用した場合や、軟膏・クリームなどを傷口に使用した場合、水道水や滅菌生理食塩水で残さないようにきれいに洗い流してください。
3. 個包装から本品を取り出し、ただちに使用してください。
4. テープ同士がくっつかないように、剥離紙をゆっくり剥がしパッドを汚さないように傷口にあて、テープ部分をよく押えてください。
* テープにシワが入らないように注意してお貼りください。シワが入ると防水性を損なう恐れがあります。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 感染した傷には使用しないでください。また、傷が感染して

いると思われる場合は使用を中止し、医師にご相談ください。感染すると一般に傷口の周りが赤く、熱を持ち、腫れやズキズキとした痛みが続きます。膿を持っていることもあります。

- 2) 使用中、発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、すぐに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談ください。
- 3) 粘着面を傷に貼らないでください。
- 4) かさぶたができていない傷、にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状及びそれらをかきむしった傷には使用しないでください。
- 5) 2歳以下の乳幼児には使用しないでください。
- 6) パッド部分にアルコールなどの有機溶媒を接触させないでください。

2. その他の注意

- 1) 個包装が破れたり、開けられたものは使用しないでください。
- 2) 滲出液がもれたり、テープがはがれたりした場合は、すぐに新しいものに貼りかえてください。
- 3) はがす時は、皮ふを傷めないようにゆっくりと剥がしてください。
- 4) 傷の大きさより大きいパッドサイズを選んでください。
- 5) 2日に1度を目安に新しいものに貼りかえてください。
- 6) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

【貯蔵方法及び使用期限等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 直射日光をさけ湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 2) 小児の手の届かないところに保管してください。

2. 使用期限

- 1) 使用期限は外箱に記載（自己認証（当社データ）による）

【包装】

規格	全体サイズ (パッドサイズ)	入数(枚/箱)	
		Mサイズ 22mm×70mm (13mm×25mm)	Lサイズ 28mm×70mm (17mm×25mm)
Mサイズ8枚		8	-
Mサイズ16枚		16	-
Lサイズ6枚		-	6
2サイズ12枚		8	4

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

TEL . 0748-52-5780

発売元

祐徳薬品工業株式会社

〒849-1393 佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

お客様相談窓口 TEL . 0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日は除く)