

この添付文書をよく読みご使用ください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

*2014 年 1 月 15 日作成(第 2 版)

2010 年 7 月 20 日作成(第 1 版)

医療機器届出番号: 25B2X10004000060

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

キズピカ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

一度使用したものは再度使わないでください。

【形状・構造及び原理等】

(パッド)

レーヨン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、


天然高分子ゲル

(粘着テープ)

ポリウレタンフィルム、アクリル系粘着剤

(セパレーター)

紙、シリコン樹脂

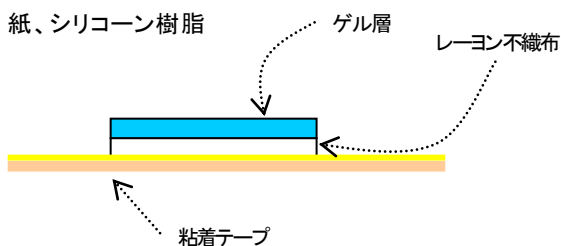

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護

【操作方法又は使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面に当て、テープで固定してください。粘着部の四方が浮いたり、シワにならないようにしっかりと固定した後、フィルムを中央の水色のテープ部分からゆっくり左右に剥がしてください。

【使用上の注意】

1. 感染した傷には使用しないでください。また、傷が感染していると思われる場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
感染すると一般に傷口の周りが赤く、熱を持ち、腫れやズキズキとした痛みが続きます。膿を持っていることもあります。
水道水や滅菌生理食塩水などで患部をよく洗い流してください。
2. 傷の周りを拭き、パッド部分を汚さないように注意して貼り付けてください。

3. 粘着面を傷に貼らないでください。

4. 本品の使用、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合は、直ぐに使用を中止し、*医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 滲出液がもれたり、テープがはがれたりした場合は、直ぐに新しいものに貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。

6. はがす時は急激に剥がしたりせず、皮膚を傷めないようにゆっくりとはがしてください。

7. 個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。

8. 品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【貯蔵方法及び品質保持期限等】

1. 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。

【包装】*

19mm×60mm 10 枚入り小箱包装

38mm×60mm 5 枚入り小箱包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780