

*2014 年 1 月 15 日作成（第 2 版）

2011 年 4 月 25 日作成（第 1 版）

医療機器届出番号 25B2X10004000061

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

E M滅菌ソフトパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理】

パッド : ポリエチレン、脱脂綿
粘着テープ : ポリエステル、アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコン樹脂

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護

【操作方法又は使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面に当て、テープで固定してください。

【使用上の注意】

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- ・本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、*医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・本品は滅菌製品ですので、開封後は速やかに使用してください。また、品質保持期限の過ぎたものは、使用しないでください。
- ・個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。

【貯蔵方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【包装】

50mm×50mm 10 枚入り袋包装
60mm×80mm 2 枚入り袋包装
60mm×80mm 5 枚入り袋包装
60mm×80mm 6 枚入り袋包装
80mm×100mm 4 枚入り袋包装
80mm×100mm 5 枚入り袋包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780