

**2016 年 8 月 改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

*2015 年 4 月 改訂（第 2 版）

医療機器届出番号：25B2X10004000065

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

モイストリバン®

再使用禁止

【禁忌・禁止】


一度使用したものは再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は粘着性を有するハイドロコロイド膏体にウレタンフィルムを貼り合わせた全面ハイドロコロイド膏体型の救急絆創膏です。

- ・ウレタンフィルム
- ・ハイドロコロイド

添加物として多糖類、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体
セパレーター：紙、シリコーン樹脂

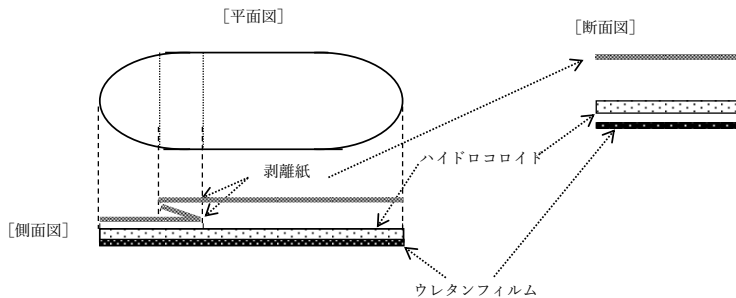

【**使用目的又は効果】

創傷面の保護

【**使用方法等】

1. 傷が感染していないことを確認してください。
2. 傷口を水道水や滅菌生理食塩水でよく洗い、傷の周りの水分をしっかりと拭いてください。
※殺菌・消毒剤を使用した場合や、軟膏・クリームなどを傷口に使用した場合、水道水や滅菌生理食塩水で残さないようにきれいに洗い流してください。
3. 個包装から本品を取り出し、ただちに使用してください。
4. **テープ同士がくっつかないように、剥離紙をゆっくり剥がし粘着面を汚さないようにして、できるだけテープ中央に傷口がくるよう貼ってください。全体をよく押さえてください。
※シワが入らないように注意してお貼りください。シワが入ると防水性を損なう恐れがあります。
**※粘着面に筋状のくぼみが認められることがありますが製造過程で発生するもので品質上問題ありません。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 感染した傷には使用しないでください。また、傷が感染していると思われる場合は使用を中止し、医師にご相談ください。感染すると一般に傷口の周りが赤く、熱を持ち、腫れやズキズキとした痛みが続きます。膿を持っていることもあります。
- 2) 使用中、発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、すぐに使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- 3) 深い刺し傷、筋肉、骨、腱が見えるような深い傷、動物や人に咬まれた傷、砂やホコリ等の異物が入り込んだ傷、かさぶたができていいる傷、にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状及びそれらをかきむしった傷、受傷後時間の経った傷には使用しないでください。
- 4) 本品を切って使用しないでください。
- 5) 2 歳以下の乳幼児には使用しないでください。
- 6) 膏体面にアルコールなどの有機溶媒を接触させないでください。

2. その他の注意

- 1) 個包装が破れたり、開けられたものは使用しないでください。
- 2) 滲出液がもれたり、テープがはがれたりした場合は、すぐに新しいものに貼りかえてください。
- 3) はがす時は、皮ふを傷めないようにゆっくりとはがしてください。
- 4) 傷の大きさより大きいサイズを選んでください。
- 5) 2 日に 1 度を目安に新しいものに貼りかえてください。
- 6) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

【**保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 直射日光をさけ湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 2) 小児の手の届かないところに保管してください。

2. 有効期間

- 1) 有効期間は外箱に記載〔自己認証(当社データ)による〕

【包装】

*入り数をパッケージに記載しています。

【**製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社
〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008
お問い合わせ先 TEL. 0748-52-5780
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日は除く)