

**2018 年 3 月改訂（第 3 版）

*2016 年 9 月改訂（第 2 版）

医療機器届出番号 25B2X10004000067

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

布バン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

【*形状・構造及び原理等】

パッド : **ポリエチレンネット、レーヨン、ポリエステル
又はポリオレフィンネット、レーヨン、ポリプロピレン/ポリエチレン
粘着テープ : スパンドックス伸縮布、ゴム系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【*使用目的又は効果】

創傷面の保護

【*使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面に当て、テープで固定してください。

【使用上の注意】

*重要な基本的注意

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・1日*2～3回、貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。

【*保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780