

*2016 年 9 月改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2014 年 9 月作成（第 1 版）

医療機器届出番号 25B2X10004000070

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

フィットバンN

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【*形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリウレタン樹脂フィルム、シリコーン・アクリル系粘着剤
セパレーター：紙、シリコーン樹脂

【*使用目的又は効果】

創傷面の保護（サカムケ、あかぎれ等）

【*使用方法等】

患部の汚れ、汗、水気などをふきとり清潔にした後、本品を患部にあてしっかり押さえてお貼りください。

【使用上の注意】

***重要な基本的注意**

- ・本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので長時間貼り付けたり急激にはがしたりしないでください。
- ・品質保持期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ・1日**2～3回,貼りかえてください。一度使用した物は再度使用しないでください。

【*保管方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。

【*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者 東洋化学株式会社
〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008
問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780