

2016年10月作成

医療機器届出番号 25B2X10004000077

医療用品(4) 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

## アルゴフィット FT 防水タイプ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
**再使用禁止**

### 【形状・構造及び原理等】

粘着テープ : ポリウレタン樹脂フィルム、シリコン・アクリル系粘着剤  
セパレーター : 紙、シリコン樹脂

### 【使用目的又は効果】

創傷面の保護 (サカムケ、あかざれ等)

### 【使用方法等】

患部の汚れ、汗、水気などをふきとり清潔にした後、本品を患部にあてしっかり押さえてお貼りください。

### 【使用上の注意】

- ・本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師、薬剤師又は製造販売業者にご相談ください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので長時間貼り付けたり急激にはがしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開封されたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ・一度使用したものは再度使用しないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780