

2016 年 10 月作成

医療機器届出番号 25B2X10004000079

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

アルゴフィット

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

(FABRIC TAPE)

パッド : ポリオレフィン、レーヨン、ポリエチレン
粘着テープ : ポリウレタン不織布、シリコーン-アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

(FILM TAPE)

パッド : ポリオレフィン、レーヨン、ポリエチレン
粘着テープ : ポリウレタンフィルム、シリコーン-アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

患部の汚れ、汗、水気などをふきとり清潔にした後、本品を患部にあてしっかり押さえてお貼りください。最初つきにくく感じるがありますが、すぐに皮膚になじんでピッタリフィットします。

【使用上の注意】

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置するとキズの治りが悪くなる場合がありますので貼り替えてください。
- ・本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・1日2～3回、貼り替えてください。一旦剥がしたものを再使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので長時間貼り付けたり急激にはがしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開封されたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限を過ぎたものは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780