

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000


再使用禁止

エレバンプレスタット ミニ

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着フィルム：レーヨン不織布
 アクリル系粘着剤
剥離紙：紙、シリコーン樹脂
パッド：ポリエステル・レーヨン・ポリプロピレン
 ・ポリエチレン不織布

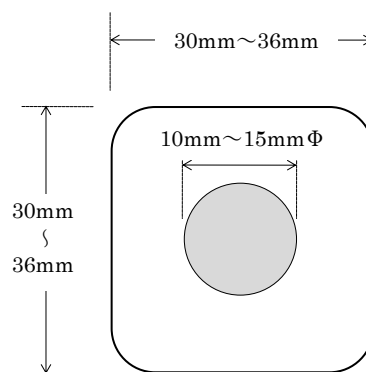


【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、
粘着フィルムで固定して使用すること。

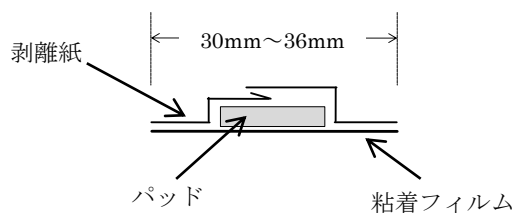

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ① 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- ② 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置を変えること。
- ③ パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
- ④ 粘着面を患部に貼らないこと。
- ⑤ 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
- ⑥ 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- ⑦ 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ窓口 (TEL) 0748-52-5001

・販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451 (代)