

2016 年 10 月作成

医療機器届出番号 25B2X10004000087

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

SB テープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
セパレーター：紙、シリコーン樹脂
パッド：セルロース不織布

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口にあて、粘着フィルムで固定して使用してください。

【使用上の注意】

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので貼り替えてください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が現われた場合には、使用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・1 日 2～3 回、貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼付したり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780