

2016 年 10 月作成

医療機器届出番号 25B2X10004000088

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

エレバンプレスタット ミニ NS

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着フィルム：レーヨン不織布、アクリル系粘着剤

剥離紙：紙、シリコーン樹脂

パッド：ポリエステル・レーヨン・ポリプロピレン・ポリエチレン不織布

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口にあて、粘着フィルムで固定して使用すること。

【使用上の注意】

- ・ 傷口とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- ・ 皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、1日1～2回粘着面の位置を変えること。
- ・ パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので、貼りかえること。
- ・ 粘着面を患部に貼らないこと。
- ・ 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止すること。
- ・ 救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780

