

2016 年 10 月作成

医療機器届出番号 25B2X10004000092

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 医療用不織布

JMDNコード 34655000

ハクゾウ滅菌ラップキュアドレッシング

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド：脱脂綿の両面にポリエチレンフィルム

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にして、パッドを傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

【使用上の注意】

- ・ パッドが汚れたり水にぬれた時は、新しいものに貼り替えてください。
- ・ 本品の使用は1回限りにしてください。
- ・ 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・ 滅菌効果が損なわれるので、使用時に開封してください。
- ・ 品質保持期限の過ぎたものは、使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光をさけ、小児の手の届かないところに保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780

