

2016 年 10 月作成

医療機器届出番号 25B2X10004000096

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

キズ保護フィルム

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリウレタン樹脂フィルム、シリコーン・アクリル粘着剤

剥離紙：紙、シリコーン樹脂

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

患部の汚れ、汗、水気などを拭き取り清潔にした後、本品を患部に当てしっかりと押さえつける。

【使用上の注意】

- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が現われた場合には使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・1日2～3回、貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼付したり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先（TEL）0748-52-5780