

2016 年 10 月作成

医療機器届出番号 25B2X10004000098

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

靴擦れケアシート

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリウレタン樹脂フィルム、
シリコーン-アクリル系粘着剤
剥離紙：紙、シリコーン樹脂

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

患部の汚れ、汗、水気などをふきとり清潔にした後、「靴擦れケアシート」を患部にあてしっかり押さえてお貼りください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。
- ・皮膚刺激の原因になりますので長時間貼付したり、急激にはがしたりしないで下さい。
- ・個包装が破れたり、開封されたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ・一度使用したものは再度使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780

販売業者

株式会社グリム

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-5-24

問い合わせ窓口 TEL052-265-7000 (代)

