

\*2018年1月 改訂（第2版）

2017年5月 作成（第1版）

医療機器届出番号 25B2X10004000100

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

## I J テープ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
**再使用禁止**



### 【形状・構造及び原理等】

(IJ テープ)

粘着フィルム：ナイロン不織布、アクリル系粘着剤  
粘着剤付剥離紙：紙、シリコーン樹脂、リピール粘着剤  
剥離紙：紙、シリコーン樹脂  
パッド：レーヨン不織布

\*(IJ テープ(リピールなし))

粘着フィルム：ナイロン不織布、アクリル系粘着剤  
剥離紙：紙、シリコーン樹脂  
パッド：レーヨン不織布

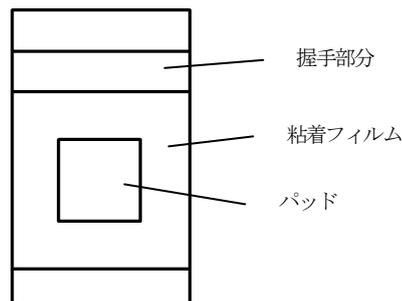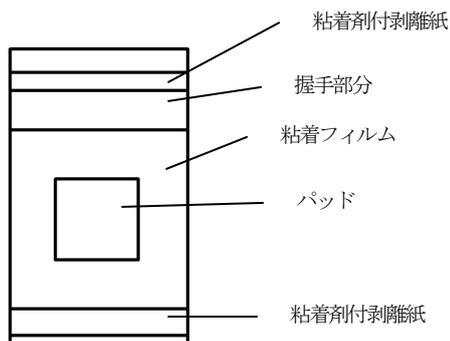

### 【使用目的又は効果】

創傷面の保護

### 【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着フィルムで固定して使用してください。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼付したり急激にはがしたりしないでください。
- ・発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・一旦はがしたものを再度使用しないでください。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780