

類別名称：歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 一般的名称：歯科用キャスティングワックス JMDNコード：16189000

販売名：東洋インレーワックス

【形状・構造及び原理等】



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同

形状：六角棒連結プレート状
該当規格：JIS T-6503「歯科用キャスティングワックス」および
ISO 1561「Dental Casting Wax」
成分：天然ワックス、レジン、およびパラフィンワックスや
微結晶系の炭化水素を主成分とする混合物

※物理的性質

品種	グリーン	グレー	ブルー	ピーチ	バイオレット
融点（℃）	59	57	60	60	59

- ①東洋インレーワックス・グリーン
- ②東洋インレーワックス・グレー
- ③東洋インレーワックス・ブルー
- ④東洋インレーワックス・ピーチ
- ⑤東洋インレーワックス・バイオレット

※焼却残さ：0.1%以下（グレー以外）
焼却残さ：0.2%（グレー）

【使用目的又は効果】

使用目的、用途

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製の
キャスティングワックス。主として、歯科鑄造用のクラウン、
インレー、クラスプ等のワックスパターンの作成に用いる。

【使用方法等】

(1) 間接法

ワックスパチュラーを加熱し、ワックス表面を溶融し石膏模型
上に盛りつけながら成形します。

(2) 浸漬法

石膏模型の支台歯部を溶融したワックスに浸漬し引き上げ、ワッ
クス硬化後に再度浸漬する動作を繰り返し、ワックスを盛った後、
カービングナイフで整形しながらパターンを作成します。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ①本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注
意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・室温保管
- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所
など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管
しないこと。