


類別名称：器具器械 6 5 歯科用充填器

一般医療機器 一般的名称：歯科用充填器 JMDNコード：70680000

販売名：オピアンキャリアー、オピアンキャリアーヘッド

【形状・構造及び原理等】

形状：

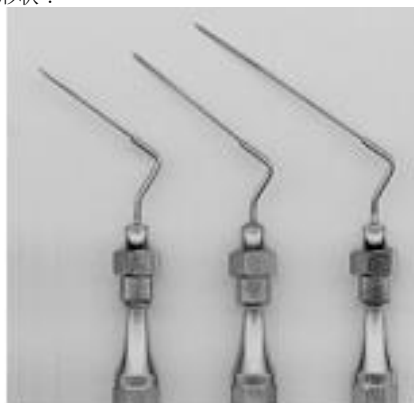

FF15 FF18 FF28

材質：ホルダー部-真鍮、メッキ ヘッド部-ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用セメント、歯科用充填用コンポジットレジン、歯科用支台築造材料、歯科用小窩列溝封鎖材、歯科用裏層材料、歯科用覆髄材料、歯科用仮封材等の歯科材料又は覆罩剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するため等に用いる再使用可能な手用器具。ただし「歯科用圧入充填器」に該当するものを除く。オピアンキャリアー根管充填法における充填器。

*【使用方法等】

- ① 使用する前に必ず洗浄すること。
- ② 根管充填の前処理が終了した後、本材を根管充填用ピンセットで挟み、加温したオピアンキャリアーまたはオピアンキャリアーFFに付け、ラバーストッパーまでの長さを計測し根管長に合わせます。
- ③ ライターなどの火焰内炎にて約0.5秒加温軟化し、ダップングラス内のユーカリソフトに浸します。
- ④ 余剰のユーカリソフト液をガーゼ等に軽く吸わせ、本材を根尖部へ置いてきます。
- ⑤ オピアンプラグー又はオブチュレーションプラグーでガッターの表面を整えるようにコンデンスします。
- ⑥ 順次、同じ操作を繰り返して行い、充填完了後、X-RAYにて確認します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・本品先端部は尖頭のため、使用時は周囲及び患者に注意し、怪我の無いよう十分に注意すること。

【使用上の注意】

- (1) 注意事項の厳守
器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- (2) 本品を加熱使用する際は、火傷の恐れがあるので、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の水で洗浄し、専門医の診断を受けさせること。
- (3) ステンレス鋼使用
素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食することがある。
- (4) 二次加工の禁止
折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の改造を絶対に行わないこと。

- (5) 家庭用洗剤の禁止
金属を腐食させることがあるため、家庭用洗剤を使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- (6) 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は金属を腐食させることがあるため、使用しないこと。
- (7) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ① 次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるため、使用しないこと。（次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン）
 - ② 薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載の注意事項を守ること。金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ③ 使用後は防錆洗浄液、精製水を用いて付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ④ 洗浄、消毒、滅菌には、出来る限り精製水を用いること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
 - ⑤ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具を変質、変色させることがある。
 - ⑥ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は十分に乾燥後、保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- (8) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止
腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉、金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。
- (9) 保管上の注意
「もらいさび」を防ぐため、腐食のある器具と一緒に保管しないこと。又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (10) 誤飲防止の為にラバーダムシートを使用すること。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

- ・使用前・使用後に、針接合部分にゆるみ、脱落、破損がないか、又、作業部・柄部に大きなキズや腐食がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- ・使用後の機器は感染症伝播防止の為に、消毒滅菌等の措置を施し、再使用すること。

○包装*

- (1) オピアンキャリアー単品販売品（ホルダー＋ヘッド）
 - ① オピアンキャリアーFF15 1本/函
 - ② オピアンキャリアーFF18 1本/函
 - ③ オピアンキャリアーFF28 1本/函

- (2) オピアンキャリアーヘッド（交換用ヘッド）

- ① オピアンキャリアーヘッドFF混
FF15, FF18, FF28 各1本計3本/函
- ② オピアンキャリアーヘッドFF15 3本/函
- ③ オピアンキャリアーヘッドFF18 3本/函
- ④ オピアンキャリアーヘッドFF28 3本/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859