

類別名称：器具器械 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 一般名称：歯科用根管プラグ JMDNコード：41876000

販売名：オピアンプラグー

※【形状・構造及び原理等】

形状



No. 95

FF (40)

材質：ホルダー部-真鍮、メッキ ヘッド部-ステンレス鋼

No. 95 タイプ 2：テーパ器具

FF (40) タイプ 4：テーパなし

【使用目的又は効果】

円柱状又は先細の作業部分を持ち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的。主として、ガッタパーチャポイント等を根管内に圧接するために用いる器具。

【使用方法等】

- (1) 使用する前に必ず洗浄すること。
- (2) キャリヤーによるガッタパーチャ充填後、オピアンプラグーで根尖方向に加圧します。

【使用上の注意】

- (1) 注意事項の厳守
器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- (2) 本品を加熱使用する際は、火傷の恐れがあるので、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。
付着した場合には、すぐに大量の水で洗浄し、専門医の診断を受けさせること。
- (3) ステンレス鋼使用
素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食することがある。
- (4) 二次加工の禁止
折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の改造を絶対に行わないこと。
- (5) 家庭用洗剤の禁止
金属を腐食させることがあるため、家庭用洗剤を使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- (6) 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は金属を腐食させることがあるため、使用しないこと。

(7) 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ① 次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるため、使用しないこと。（次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン）
- ② 薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ③ 使用後は防錆洗浄液、精製水を用いて付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ④ 洗浄、消毒、滅菌には、出来る限り精製水を用いること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- ⑤ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具を変質、変色させることがある。
- ⑥ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

(8) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止

腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉、金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。

(9) 保管上の注意

「もらいさび」を防ぐため、腐食のある器具と一緒に保管しないこと。又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

(10) 取扱いについて

器具の寿命を著しく低下させるため粗雑な取扱いは避けること。

【保守・点検に係る事項】

【使用前・使用後の点検】

- ・使用前・使用後に、作業部・柄部に大きなキズや腐食がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- ・使用後の機器は感染症伝播防止の為、消毒滅菌等の措置を施し、再使用すること。

包装

- ① オピアンプラグー No. 95 1 本/函
- ② オピアンプラグー FF (No. 40) 1 本/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋 4-2 5-1 2
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859