


類別名称：器具機械65 歯科用充填器
一般医療機器 一般的名称：歯科用根管プラグ JMDNコード：41876000

販売名：オブチュレーションプラグ

※【形状・構造及び原理等】

形状

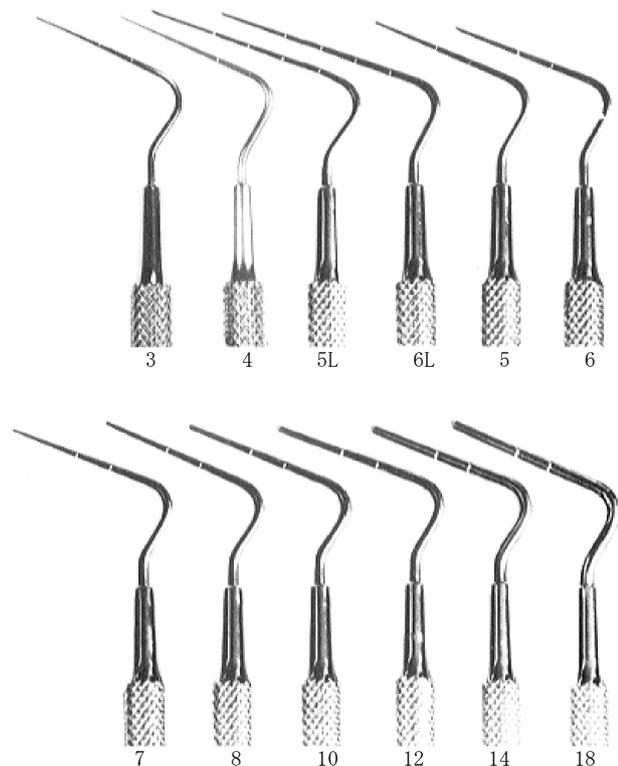

No.	ISO No.	先端直径(mm)
3	30	0.3
4	40	0.4
5	50	0.5
5L	50 Long	0.5
6	60	0.6
6L	60 Long	0.6
7	70	0.7
8	80	0.8
10	100	1.0
12	120	1.2
14	140	1.4
18	180	1.8

材質：ホルダー部-真鍮、メッキ ヘッド部-ステンレス鋼

タイプ2：テーパ器具

【使用目的又は効果】

円柱状又は先細の作業部分をもち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的。主として、オブチュレーションガッター等のガッターパーチャポイントに垂直加圧充填を行う器具。

【使用方法等】

- (1) 使用する前に必ず洗浄すること。
- (2) プラグの選択
根管形成で最後に用いたファイルサイズより、やや太いプラグを選択し、根管長より3mm短い位置にラバーストッパーを取り付けます。

- (3) 垂直加圧
選択したプラグを根管内にゆっくりと挿入し、垂直に加圧します。

【使用上の注意】

- (1) 注意事項の厳守
器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- (2) 本品は尖頭器具のため、患者及び周囲の環境に損傷を与えぬよう注意して使用すること。
- (3) ステンレス鋼使用
素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食することがある。
- (4) 二次加工の禁止
折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の改造を行わないこと。
- (5) 家庭用洗剤の禁止
金属を腐食させることがあるため、家庭用洗剤を使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- (6) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
①薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがある。
②使用後は防錆洗浄液、精製水を用いて付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
③加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具を変質、変色させることがある。
④洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- (7) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止
腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉、金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。
- (8) 保管上の注意
「もらいさび」を防ぐため、腐食のある器具と一緒に保管しないこと。又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (9) 取扱いについて
器具の寿命を著しく低下させるため粗雑な取扱いは避けること。

【保守・点検に係る事項】

【使用前・使用後の点検】

- ・使用前に、作業部・柄部に大きなキズや腐食がないか確認すること。また、作業部接合部にゆるみがないか確認し、脱落のおそれのないことを確認してから使用すること。
- ・使用後の機器は感染症伝播防止の為、消毒滅菌等の措置を施し、再使用すること。

包装

- ①単品包装 1本/袋
- ②8本セット No. 5, 5L, 6, 6L, 7, 8, 10, 12 各1本、合計8本/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859