


類別名称：歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 一般的名称：歯科技工用アプレシブ研削器具 JMDNコード：70901000

販売名：東洋スピードホイール

【形状・構造及び原理等】

形状：円盤状

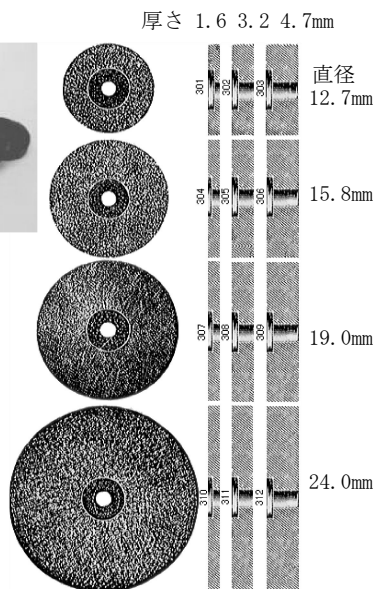

- ①スピードホイール-----No. 301～312
②グリーンホイール-----No. 305～309

成分：シリコンカーバイド砥粒を主成分とする混合物

【使用目的又は効果】

炭化けい素、アルミナ等を用いる技工用研削材。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。主として歯科補綴物の研磨に用いる研磨材。

カーボランダムホイール

- ①スピードホイール-----汎用金属・硬質金属の荒研磨
②グリーンホイール-----陶材等セラミックスの荒研磨

【使用方法等】

- (1) 本品をマンドレールに弛みのないよう装填し、ハンドピースに装着します。
- (2) 低速で予備回転し、がたつきが無いかを検査のうえ、歯科補綴物にゆっくりと接触させます。
- (3) 研磨部位に応じて盤面及び盤側を使用し、スナップを利用しハンドピースを動かしながら通法に従って作業します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) マンドレールをチャックの奥に当たるまで入れて取り付けること。
- (2) 使用開始時には、必ず低速で予備回転し、振れのないことを確認して下さい。
- (3) 空で予備回転した時に振れを感じたら、ソリまたは軸ズレの可能性があります。ドレッサーで形態調整を行って下さい。
- (4) 研磨時、過度に力をかけないこと。過熱や破折の原因となります。
- (5) 万一の破折や切削屑の飛散による目や顔面の防御の為、作業中は保護眼鏡やフェイスカバーを必ず着用すること。
- (6) 研磨中の粉塵吸入予防をすること。
- (7) 使用回転数はNo. 301～309で30,000回転/分以下、No. 310～312では20,000回転以下を厳守のこと。高速回転すると軸の曲折、製品の破断等による重大な事故の原因になります。
- (8) 必ず順回転で使用する。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ①本材は必ず口腔外で使用する。
- ②万一の破折や切削屑の飛散による眼や顔面の防御の為、作業中は保護メガネやフェイスカバーを必ず着用すること。
- ③本材を使用する際には、研磨粉塵による人体への影響を避ける為、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。

※【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・本材は適切に保管・管理すること

○包装

12枚/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859