


※2021 年 03 月改訂（新様式第 6 版）
2017 年 10 月改訂（新様式第 5 版）

医療機器届出番号：13B2X00026022032 号

類別名称：歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 一般的名称：歯科用キャストイングワックス JMDNコード：16189000

販売名：スプルーワックス

【形状・構造及び原理等】

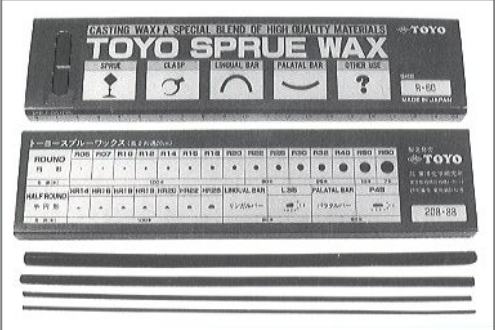

形状：線状
長さ：20 cm 共通
太さ：サイズ記号数値×0.1 (mm)
成分：天然ワックス、レジン、およびパラフィンワックスや
微結晶系の炭化水素を主成分とする混合物

※物理的性質

融点	57℃ R 60℃ HR
----	-----------------

品番	本数/箱
R05, R07, R10, R12, R14, R15, R18, R20 HR14, HR16, HR18, HR19, HR20, HR22, HR28	100 本
R22, R25, L35, P45	50 本
R30, R32, R40	25 本
R50	10 本
R60	7 本

略号 R: Round (円形) HR: Half Round (半円形)
L: Lingual Bar (リンガルバー)
P: Palatal Bar (パラルバー)

※焼却残さ：0.1%以下

【使用目的又は効果】

使用目的、用途
ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストイングワックス。主として湯道、湯溜まり、クラスプ、バー等のワックスパターン作成に用いるワックス。

【使用方法等】

- (1) 湯道としての使用
- ①ワックスパターンの大きさと铸造する金属に応じて適切なサイズを選択します。
 - ②湯道として使用する場合には铸造リング内のワックスパターンの位置・方向を考慮して、適切な長さに切断します。
 - ③ワックスパターンとの接合部に溶着し円錐台に植立します。
- (2) クラスプ、バーの作製の作製
- ①クラスプにはHR（半円形）の適当なサイズ、リンガルバーにはL35、パラルバーにはP45を選択し、通法に従い、作製します。

【使用上の注意】

- (1) 使用注意
- ①本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- [貯蔵・保管方法]
- ・室温保管
 - ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
 - ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
 - ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同