

類別名称：歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 一般的名称：歯科用パラフィンワックス JMDNコード：70893000

販売名：東洋パラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】



形状：板状(板面 147×78mm)

該当規格：JIS T-6502 「歯科用パラフィンワックス」タイプ2
ISO 12163 「Dental baseplate/modelling wax」

成分：パラフィンワックスや微結晶系の炭化水素を主成分とする混合物

※物理的性質

凝固点 (°C)		56.5	
加圧短縮率 (%)	温度	東洋化学	JIS 規格 (硬質)
	23°C	0.16	1.0 以下
	37°C	5.35	10.0 以下
	45°C	83.80	50.0 以上 90.0 以下

【使用目的又は効果】

使用目的、用途

主として義歯床の仮床、人工歯の配列等に用いるワックス。

【使用方法等】

義歯床作成

- ①板状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところでロール状に巻いて棒状にします。
- ②棒状にしたワックスを馬蹄形にして、基礎床に圧接していきます。
- ③過不足部分は盛り足したり、削ったりして咬合床を完成します。
- ④咬合床の調整、人工歯の配列、ろう義歯の作製は、通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

(1)使用注意

- ①本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・ 室温保管
- ・ 本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

品種

- ①パラフィンワックス・レギュラー 1 Kg (厚さ 1.45mm)
- ②パラフィンワックス・レギュラー 500 g (厚さ 1.45mm)
- ③パラフィンワックス 3.0 mm : 500 g 入 (厚さ 3.0mm)
- ④パラフィンワックス 2.0 mm : 500 g 入 (厚さ 2.0mm)
- ⑤パラフィンワックス 1.0 mm : 225 g 入 (厚さ 1.0mm)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所

製造元：同