

類別名称：器具器械65 歯科用充填器
一般医療機器 一般的名称：歯科用根管プラグ JMDNコード：41876000

販売名：東洋ヒートキャリアー

※【形状・構造及び原理等】

形状（先端径:0.5mm テーパー:3/100）タイプ2：テーパー器具



材質：ホルダー部-真鍮、メッキ ヘッド部-ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

円柱状又は先細の作業部分を持ち、横断面が円形で先端が平坦な歯科用器具。根管に充填物を主に軸方向に充填することを目的。主として、根管にガッタパーチャの加熱軟化、根管乾燥を行う器具。

【使用方法等】

- (1) 使用する前に必ず洗浄すること。
- (2) ガッタパーチャの加熱軟化
ヘッド部分を加熱し、根管内に挿入しガッタパーチャポイントに接触させ軟化します。
- (3) 根管乾燥
根管洗浄後、加熱したヒートキャリアーを根管内に挿入し、根管内の水分を蒸発させます。

【使用上の注意】

- (1) 注意事項の厳守
器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- (2) 本品を加熱使用する際は、火傷の恐れがあるので、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の水で洗浄し、専門医の診断を受けさせること。
- (3) 本品は尖頭器具のため、患者及び周囲の環境に損傷を与えぬよう注意して使用すること。
- (4) ステンレス鋼使用
素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食することがある。
- (5) 二次加工の禁止
折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の改造を絶対に行わないこと。
- (6) 家庭用洗剤の禁止
金属を腐食させることがあるため、家庭用洗剤を使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- (7) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ①薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ②使用後は防錆洗浄液、精製水を用いて付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ③加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具を変質、変色させることがある。

④洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。

(8) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止
腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉、金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。

(9) 保管上の注意
「もらいさび」を防ぐため、腐食のある器具と一緒に保管しないこと。又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

(10) 取扱いについて
器具の寿命を著しく低下させるため粗雑な取扱いは避けること。

(11) 本材は、加熱使用するため、使用の際、火傷をしないよう、患者に火傷をさせないよう注意すること。

【保守・点検に係る事項】

[使用前・使用後の点検]

- ・使用前・使用後に、摘み部分に破損、ヒビ、キズがないか、又、作業部・柄部に大きなキズや腐食がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- ・使用後の機器は感染症伝播防止の為、消毒滅菌等の措置を施し、再使用すること。

包装

1本/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859