


類別名称：歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 一般的名称：歯科用パラフィンワックス JMDNコード：70893000


販売名：リムブロック

【形状・構造及び原理等】

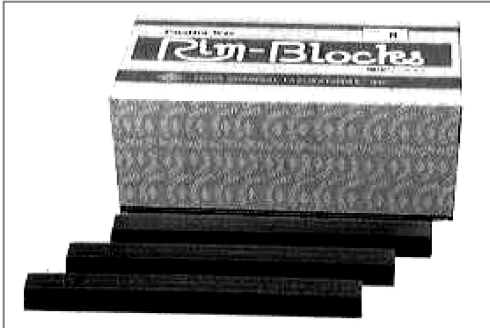

形状：台形棒状 長さ 145mm

断面図

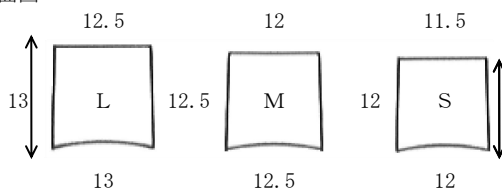

成分：パラフィンワックスや微結晶系の炭化水素を主成分とする混合物

【使用目的又は効果】

使用目的、用途

主として義歯床の仮床、人工歯の配列等に用いるワックス。

【使用方法等】

(1) 蠟堤作成

- ①角棒のワックスを常温で適度に曲げ、馬蹄形とし、模型に圧接していきます。
- ②過不足部分は盛り足し、或いは削って咬合床を完成します。
- ③咬合床の調整、人工歯の配列、ろう義歯の作製は、通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ①本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・室温保管
- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同