

類別名称：歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 一般的名称：歯科用パラフィンワックス JMDNコード：70893000

販売名：リムレディー

【形状・構造及び原理等】



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同

形状：馬蹄形状
実物大



成分：パラフィンワックスや微結晶系の炭化水素を主成分とする混合物

【使用目的又は効果】

使用目的、用途

主として義歯床の仮床、人工歯の配列等に用いるワックス。

【使用方法等】

(1) 蠟堤作成

- ①馬蹄形状のワックスを約 45～46℃の温水で適度に軟化させたところで、模型に圧接・適合し、咬合堤を作成します。局部床義歯の場合は、この段階で切断分割して使用します。
- ②過不足部分は盛り足したり、削ったりして咬合床を完成します。
- ③咬合床の調整、人工歯の配列、ろう義歯の作製は、通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ①本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・室温保管
- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。