

類別名称：歯科材料07 歯科用ワックス  
一般医療機器 一般的名称：歯科用キャストینگワックス JMDNコード：16189000

## 販売名：スーパーインテリアワックス

### 【形状・構造及び原理等】

形状：缶入

成分：天然ワックス、レジン、パラフィンワックス及び微結晶系の炭化水素を主成分とする混合物

物理的性質

融点	50℃
----	-----

※焼却残さ：0.1%以下

### 【使用目的又は効果】

使用目的、用途

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストینگワックスをいう。

### 【使用方法等】

- 1) ワックススパチュラーを加熱し、ワックス表面を溶融し石膏模型上に盛りつけながら成形します。

### 【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ① 本材は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・ 室温保管
- ・ 本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本材は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

包装

質量 30g（缶入）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所  
製造元：同  
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12  
電話番号：03-3962-8811  
ファックス：03-3961-1859

販売元：有限会社アトミック  
住所：〒566-0001 大阪府摂津市千里丘4-11-14  
電話番号：06-6330-0428

取扱説明書等を必ずご参照ください。