

類別名称：歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 一般名称：歯科用研磨器材 JMDNコード：70907000

販売名：MFポリッシングワックス

【形状・構造及び原理等】

形状：角棒状(15×15×80mm)

成分：天然ワックス、レジン、パラフィンワックスや微結晶系の炭化水素、及びホワイトアランドムを主成分とする混合物

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

主として歯科補綴物ミリング面の最終鏡面研磨に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品をミリングカッターに十分に取り、3,000～5,000rpmの低速回転で研磨する金属面にカッター回転とは逆方向左から右移動させながら研磨面全体にワックスを付着させます。
- 2) フェザータッチでカッターと同方向右から左へ移動させながら鏡面仕上げを行います。

【使用上の注意】

- ①本材は必ず口腔外で使用する。
- ②万一の切削バー等の破折や切削屑の飛散による眼や顔面の防御の為、作業中は保護メガネやフェイスカバーを必ず着用すること。
- ③本材を使用する際には、適切な換気がなされている場所で使用すること。また、研磨粉塵による人体への影響を避ける為、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ④本材は、可燃性であるので、火気から遠ざけて使用し、火傷をしないよう注意すること。
- ⑤他の製品と混用しないこと

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・室温保管
- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。

○包装

1 本(約 15×15×80mm/函)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋 4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859

販売元：ヘレウス クルツァー ジャパン株式会社
住所：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 4-174
<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>
フリーダイヤル：0120-230-331