

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ（35384000）

***メジルーザー針 NMP**

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止
- 本品はプレフィルドシリンジ専用のアダプタであり、一般のシリンジには使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、主に針基及び針管により構成され、針基は注射針等側に、針管はプレフィルドシリンジ側に取り付ける器具である。

2. 形状・構造

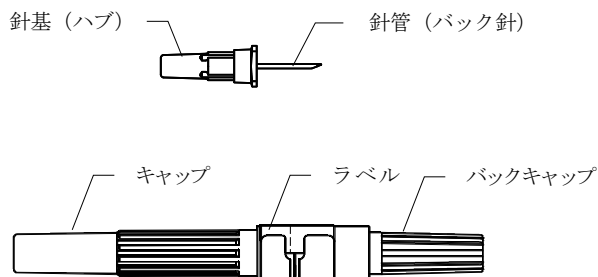

3. 原材料

針管：ステンレス鋼 JIS G 4305 SUS 304
針基：ポリプロピレン（PP）

【使用目的又は効果】

注射針等をプレフィルドシリンジに接続するアダプタである。

【使用方法等】

- キャップとバックキャップを互いに反対方向にねじり、ラベルを破って開封する。
- バックキャップをまっすぐに引いて取り外し、そのままの状態ではプレフィルドシリンジの筒先に差し込み連通させる。
- キャップを取り外し、一般用注射針又は三方活栓等を取り付ける。（接続部について十分嵌合したことを確認の上使用すること。）
- 薬剤が全部注入されてから、他の機器から取り外す。
- 使用後、プレフィルドシリンジから取り外す際には、用具を使用するか、誤刺防止に配慮して慎重にリキャップし、少し押し込んだ後キャップを回しながら取り外す。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 必ず併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後使用すること。また、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。

- 先端の内腔がφ2.2mm以下のシリンジを併用しないこと。[嵌合できないため。]
- 万一、針管、針基、キャップの破損・汚損等の異常が認められた場合は使用しないこと。
- ラベルは使用直前に開封すること。
- 本添付文書に記載した使用目的以外に使用しないこと。
- 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- 使用後は針管に触れずに、感染防止に配慮し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

〈有効期間・使用の期限〉

有効期間は、滅菌後3年。
使用期限は、使用期限欄を参照すること。
（自己認証による。）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

栃木精工株式会社

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町2丁目1番5号
TEL：0282-27-1133