

器 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器 通気針（70199000）

* **マイオビュー「注射用」標識用エアーク**

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、通気装置（本体、針基、針管）、キャップにより構成される。

＜構成＞

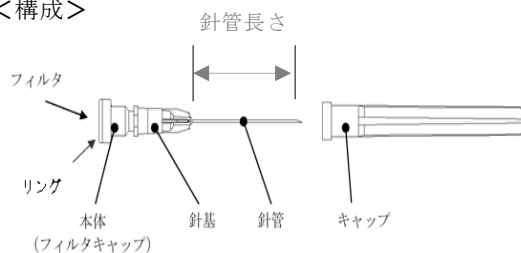

【使用目的又は効果】

マイオビュー®「注射用」の容器内に通気させるために使用するフィルタ付の針。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
2. 本品のキャップを外します。
3. マイオビュー®「注射用」の容器のゴム栓の部分に、本品を垂直に刺通します。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 本品と容器の接続は外れないように確実にすること。
- キャップを外すときは、針先がキャップに触れないように注意すること。〔針先が変形し、切れ味が悪くなる可能性がある。〕
- 本品をマイオビュー®「注射用」容器のゴム栓に対し、斜めに刺通したり、刺通中に横方向への力を加えないこと。〔針管の曲がり、破損が生じる場合がある。〕又、ゴム栓への刺通はゆっくり、垂直に行い、同一箇所を繰り返し刺通しないこと。〔刺通部分を削り、針管内に詰まりが生じる。又はゴム片等が混入する可能性がある。〕
- キャップを再装着する場合には、誤穿刺及びキャップからの針の飛び出しに注意して慎重に行うこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

(1)外れ、破損

- 開封時は接続部の外れがないことを確認してから使用すること。
- 使用中は接続部の緩み、液漏れ及び破損等に注意し、定期的に確認すること。
- 本品に過剰な負荷をかけないこと。〔針管、針基又はゴム栓が破損し、薬液等が漏れる可能性がある。〕
- 包装を開封したらすぐに使用すること。

- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。

＜その他の注意＞

- 針管には直接手を触れないこと。
- 誤穿刺に注意すること。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- 水ぬれに注意し、高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。

＜有効期間・使用期限＞

使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。〔自己認証（当社データ）により設定〕

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

栃木精工株式会社

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町 2 丁目 1 番 5 号

TEL：0282-27-1133