

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット（37243002）

かんたん採血セット ‘栄研’

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 出血性疾患や薬剤服用等により、止血機能が低下している患者への使用禁止
- 本品の穿刺器具（自動ランセット）を用いて手指先以外の採血は禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本製品は、手指先から簡単に微量採血が実施できるよう、穿刺器具、絆創膏、消毒布及び採取した血液を入れる検体チューブをセットにした組合せ製品である。

* 2. 構成


① 穿刺器具

保護
キャップ ホルダー



穿刺針の材質：ステンレス鋼
穿刺針の寸法：φ 0.81 mm，穿刺深さ 1.8 mm

② 消毒布（1 または 2）

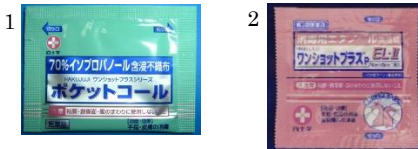

③ 絆創膏



④ 検体チューブ



チューブ
本体 遠心用
キャップ 輸送用
キャップ

【使用目的又は効果】

本品は、手指先より簡単に微量の血液を採取するために組合せた採血セットである。

【使用方法等】

本製品は、血液検査の際に指先を傷つけ、少量の血液を容易に採取するための器具です。

1. 手を温水で温めながら洗浄する。
2. 指先を消毒布で拭き十分に乾かす。
3. 穿刺器具（自動ランセット）の保護キャップをねじって引張り、ホルダーから取り外す。
4. ホルダーを指で保持し、先端部分を穿刺指の腹に垂直に押し当てる。

5. 「カチッ」という作動音がするまでさらに押し付ける。〔作動する前に指の腹から離すと穿刺ができなくなる。〕
6. 指を付け根から絞り出血させる。
7. 検体チューブのパッドに血液を垂らす。
8. 必要量採血した後、針で刺した部分に添付の絆創膏を貼り止血する。
9. 検体チューブに遠心用キャップ（水色）をして遠心機にセットする。
10. 遠心分離する。（一定時間で自動停止します。）
11. 遠心機から検体チューブを取り出す。
12. 遠心用キャップ（水色）・中栓を取り外す。
13. 輸送用キャップ（白色）をする。
14. 検体チューブ、遠心用キャップ、中栓、穿刺器具をそれらが入っていたケースに収納する。
15. 検体チューブを収納したケースは提出するまで冷暗所（冷蔵庫等）に保存する。

〈使用方法に関する使用上の注意〉

1. 血液は指の上に血が十分にたまってから（小豆くらいの大きさ）、検体チューブに垂らすこと。
2. 血を検体チューブに垂らす際には、パッドに指をこすりつけないこと。
3. 採血した検体チューブは速やかに遠心機で遠心分離すること。
4. 輸送中に血液が漏れないように、輸送用キャップはしっかりしめること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 刺した部分が化膿した場合は、医師に相談すること。
2. 絆創膏又は消毒布を使用した際に、アレルギー症状（発疹・発赤・かゆみ等）があらわれた場合は使用を中止し、医師に相談すること。
3. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水（温水）でよく手を洗うこと。
4. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがある。〔アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告がある。〕
5. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがある。
 - ・脱水状態 ・ショック状態 ・末梢循環障害

〈その他の注意〉

1. 穿刺器具は子供の手の届かない場所に保管すること。
2. 採血後は、刺した部分をティッシュペーパー等で軽く押さえ絆創膏を貼ること。
3. 本製品をご使用になる際は、販売名「かんたん遠心機 EC-10（届出番号：14B3X00011000002）」が必要です。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

〈使用期限〉

使用期限は外箱に記載（自己認証（当社データ）による）

取扱説明書を必ずご参照ください。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元及び製造元

栃木精工株式会社

TEL：0282-27-1133

〔販売業者〕



栄研化学株式会社

栃木県下都賀郡野木町野木 143 番地

お問い合わせ先：

栄研化学株式会社 お客様相談窓口

フリーダイヤル  0120-308-421