

エコープローブカバー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・次の患者・医療従事者には使用しないこと。
 1. 過去に「天然ゴム」に対してアナフィラキシー症状様の既往歴のある患者・医療従事者


【形状・構造及び原理等】

本品は天然ゴムラテックス製の人体開口部プローブ専用のカバーです。滅菌処理はしていません。

形状：先なしタイプ（P）

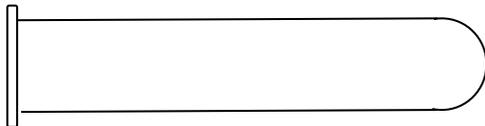

先付きタイプ（N）

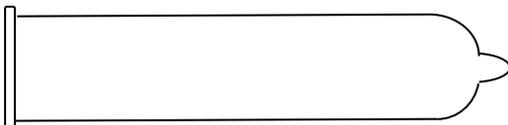

【使用目的又は効果】

超音波プローブに装着し、体液等から保護するために用いること（単回使用のものに限る）。

【使用方法等】

1. 本品を個別包装内の端によせ、本品から遠い端を指で破り、本品にキズをつけないように取り出します。
2. プローブ先端（超音波発信部）に超音波用ゼリーを適量滴下します。
3. 本品を巻き方向に注意してプローブの上に置きます。（逆巻きに置きますと巻きほぐせません。）
4. 本品を両手の指でゆっくりとプローブの根元に向かってこがし、プローブ全体に被せます。
5. 被せ終わったらプローブグリップ部と本品の端を一緒に握り、本品を固定したまま操作してください。その際に、本品を引っ張りぎみに握りますと、プローブ先端と本品との間の空気を除去しやすくなります。（空気が入りますと画像に影響が出ます。）
6. 本品は1個につき1回限りの使用にとどめ、再使用せずにその都度新しい物をご使用ください。使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分してください。

【使用上の注意】

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師による適切な措置を施してください。
- ・ピンセット等の器具で取り扱っていると傷つき破損の原因になるので注意してください。
- ・ハサミ、メス等鋭利な器具との接触は避けてください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光、紫外線、オゾン、高温、多湿、その他有害ガス発生場所を避けて保管すること。

2. 使用期限

外箱に記載。

[自己認証（当社データ）による]

【包装】

*1箱 144枚入り（1枚ずつの個包装）

【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売業者 澤谷ゴム株式会社

住所 〒680-1202

鳥取県鳥取市河原町布袋21-1

電話番号 0858-85-5656

FAX 0858-85-3056