


機械器具(48)注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001

トップ シリンジ カテーテルチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

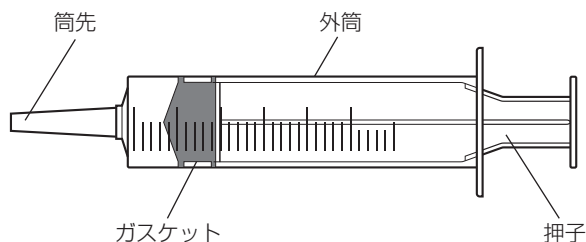

・筒先の形状が、カテーテルチップ型です。

※※(材質)

外筒、押子	ポリプロピレン
ガスケット	ブタジエンゴム
潤滑剤	シリコーン油

【使用目的又は効果】

- ※ ・レビン管、ネラトン管及びシリコーン管等との併用により体内内容物吸引、洗浄等の目的で液体又はガスを注入するか引き抜くために用いること。

【使用方法等】

1. 本品の個包装を開封する。
- ※ 2. 筒先の汚染に注意しながら、体内内容物吸引、洗浄等の目的に応じて使用する。
3. 滅菌されているので、そのまますぐに使用できる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 本品に衝撃等を加えないこと。[破損のおそれがある。]
- 2) 低温下の衝撃で破損するおそれがあるため、冷所保存する際は取り扱いに注意すること。
- 3) 外筒の目盛を越えて押子を引くと、押子が外筒から外れるおそれがあるので注意すること。
- 4) 外筒を強く押し潰したり、握ったり、又は押子を斜めに引くと、外筒とガスケットの密着性が低下して液漏れや空気混入するおそれがあるので注意すること。
- 5) 外筒印刷部を擦ったり、薬液等を付着させると、印刷部が剥離するおそれがあるので注意すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 使用前、接続部に緩みのないことを確認すること。
また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れについて、定期的に確認すること。
- 2) 接続部に薬液等が付着すると、接続部にゆるみ等が生じる場合があるので注意すること。

＜不具合・有害事象＞

- 1) その他の不具合
汚染、包装の損傷、漏れ、曲がり、外れ、緩み、穴、折れ、亀裂、切断、詰まり、注入不能、印刷消え
- 2) その他の有害事象
感染

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ (添付文書の請求先)
TEL 03-3882-3101

