


機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

トップ 排尿チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

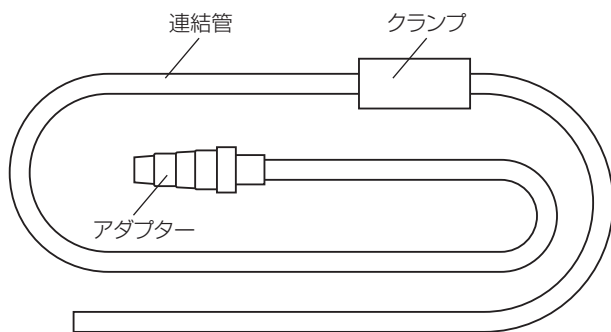

・本品はポリ塩化ビニル(可塑剤：フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を使用している。

(材質)

連結管	ポリ塩化ビニル
アダプター	ABS

【使用目的又は効果】

・本品は、泌尿器用カテーテルの排尿口に接続して、採尿容器まで尿を導くための延長チューブです。

【使用方法等】

1. 排尿チューブのクランプを折り曲げて、チューブを閉塞させる。
2. 泌尿器用カテーテルの排尿口（ファネル）と排尿チューブのアダプターとを接続する。
3. 排尿チューブの他端を採尿容器まで導く。
4. 排尿チューブのクランプを元に戻して、尿が排尿チューブ内を流れて採尿容器に流れ込むことを確認する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・チューブを押し潰したり、折り曲げると、チューブが閉塞して尿が流れなくなるおそれがある。
- ・本品の使用に際し連結管の端面が開放状態にならないよう考慮して使用すること。[尿路感染のおそれがある。]
- ・排尿が逆流しないように考慮して使用すること。[逆行感染のおそれがある。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ※ ・使用前、接続部がしっかり接続されていることを確認すること。また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・接続部に薬液が付着すると、接続部に緩み等が生じる場合があるので注意すること。

※ ＜不具合・有害事象＞

1) その他の不具合

汚染、包装の損傷、接続不良、漏れ、外れ、亀裂、詰まり、変色(紫色尿バッグ症候群等)

2) その他の有害事象

感染

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

