


医療用品 (3) 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000
レミディーPVCメディカルグローブ
(パウダーフリー)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

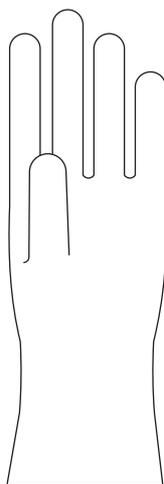

- ・本品は滅菌済み品です。
- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用している。

** (仕様)

- ・JIS T 9116(使い捨て検査・検診用ビニル手袋)を準拠する。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。

【使用方法等】

1. 包装を開封して、台紙ごと手袋を取り出す。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- ・体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。
- ・この手袋は60℃以上の熱いものに触れさせないこと。手袋の素材であるポリ塩化ビニルは高い熱により破損する可能性がある。

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)＞

- ・薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認して使用すること。

** ・油脂により材質が劣化する場合がありますので確認して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の有効期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

* 9 1 5 0 - 4 *

