

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 チューブ用クランプ 43223000


トップ 板クレンメ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図(代表図)>

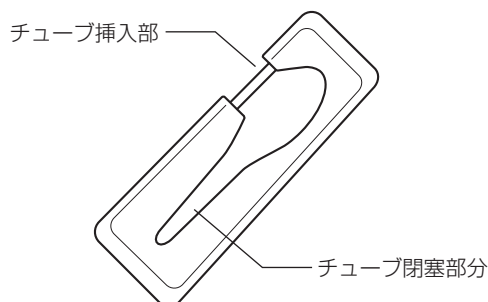

原理: 本品をチューブに取り付け、チューブを遮断又はつまむことで、チューブ内を開放又は閉塞状態にする。


材質: ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

・本品は、チューブを遮断するか、つまむための医療機器であり、流路の開閉を行うために使用する。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
2. 流路の開閉を行いたい延長チューブ等に取り付ける。
3. チューブを閉塞部分に押し込むと流路を閉じることができる。(図1)
4. チューブを閉塞部分から引き出すと流路を開くことができる。

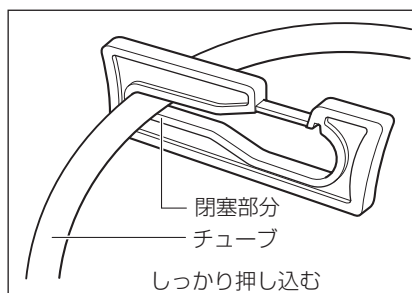

(図1)

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・本品はチューブ外径(φ2.1mmからφ3.5mm)の延長チューブ等のクランプ操作ができるように設計されている。それ以外の外径チューブに使用しないこと。[クランプが正常に機能しなかったり、チューブのキンクや本品が破損するおそれがある。]
- ・本品の操作にあたっては、チューブの閉塞及び開通を必ず確認すること。[チューブの材質(肉厚や硬度等)によってはクランプが正常に機能しなかったり、チューブのキンクや本品が破損するおそれがある。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・使用前、チューブの閉塞及び開通を必ず確認すること。また、使用中はチューブの閉塞及び開通について、定期的に確認すること。

* <不具合・有害事象>

1) その他の不具合

クランプ不良(破損、変形)

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ(添付文書の請求先)

TEL 03-3882-3101

