

医療用品（3）手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

トップニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】


＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
- ・オゾンを発生させる機器の近くを避け、出来るだけ箱包装のまま保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

【形状・構造及び原理等】

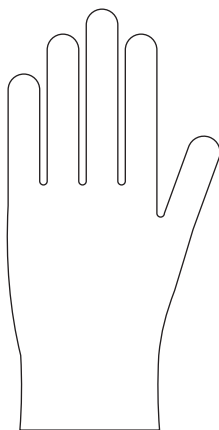

- ・本品は未滅菌品です。
- ・本品はニトリルゴムを使用している。

（仕様）

- ・ ASTM D6319-10 (Standard Specification for Nitrile Examination Gloves for Medical Application) を準拠する。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

1. 箱のミシン目を切り取る。
2. 1枚ずつ箱より引き出し装着する。
3. 手袋の左右は共通になっている。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- ・体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

- ・薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認して使用すること。

