

医療用品（3）手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000


# トップメディカルグローブ

## 再使用禁止

【禁忌・禁止】  
・再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

5x0760

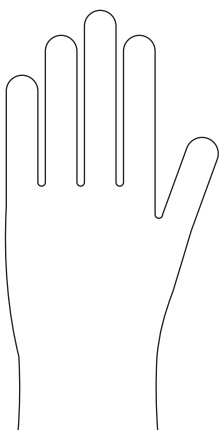

- ・形状：S 直指形手袋
- ・表面仕上げ：T 表面の一部が粗面の手袋
- ・本品は滅菌済み品です。
- ・本品はニトリルゴムを使用している。

## （仕様）

- ・BS EN 455-1 (Medical gloves for single use. Requirements and testing for freedom from holes)、
  - BS EN 455-2 (Medical gloves for single use. Requirements and testing for physical properties)、
  - BS EN 455-3 (Medical gloves for single use. Requirements and testing for biological evaluation)
- を準拠する。

## 【使用目的又は効果】

- ・本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う際に、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

## 【使用方法等】

1. 包装を開封して、台紙ごと手袋を取り出す。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して装着する。
3. 手袋の左右は共通になっている。

## 【使用上の注意】

### ＜重要な基本的注意＞

- ・刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開いたりすることがあるので注意すること。
- ・体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。

### ＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)＞

- ・薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので確認して使用すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

### ＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
- ・オゾンが発生させる機器の近くを避け、出来るだけ箱包装のまま保管すること。

### ＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）  
TEL 03-3882-3101

