

\*\*2018年06月25日改訂（第3版）  
\*2017年11月01日（第2版）


届出番号：08B2X00011000008

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アプレシブ研削器具 70901000  
**ソフライナータフ フィニッシングポイント**

**【形状・構造及び原理等】**

1) 形状・構造

本品は、アルミナ質砥粒を不織布でできた基材に保持した作業部と、歯科用ハンドピース等に装着するための軸部から成る。

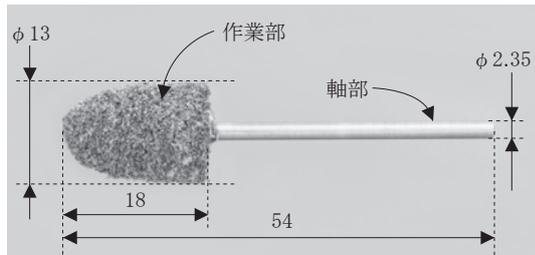

単位：mm

- ・ストレートハンドピース用（HP用）
- ・作業部の色調：茶
- ・材質

\*\*

作業部	砥粒：酸化アルミニウム 基材：ナイロン不織布
軸部	ステンレス鋼

2) 原理

歯科用ハンドピース等の回転機器に本品の軸部を装着して回転させ、作業部のアルミナ質砥粒が材料を研削・研磨する。

**【使用目的又は効果】**

アルミナ等を用いる技工用研削材。

- ・シリコン系弾性裏装材の仕上げ研磨

**【使用方法等】**

本品に破損などの異常がないことを確認します。

- 1) 通法に従い、本品を歯科用ハンドピース等に装着し、回転させます。
- 2) 被研削物の表面を軽く滑らせるように研削し、仕上げ研磨を行います。

●使用回転数

4,000 rpm 以下

4,000 rpm以上で使用した場合には、本品の耐久性が著しく低下します。

**【使用方法等に関連する使用上の注意】**

- ・ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンク（軸）を確実に奥まで挿入して、チャックがしっかりと噛んでいることを確認すること。
- ・使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認すること。
- ・【使用方法等】の2)に指定した使用回転数を厳守すること。
- ・無理な角度、過度の加圧状態で使用しないこと。過度に押し付けた場合には、耐久性が著しく低下します。
- ・回転中は、身体や衣服に触れないよう注意すること。

**【使用上の注意】**

1) 使用注意

- ・変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは、使用しないこと。
- ・本品を使用する際は、目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等の防具を着用すること。
- ・局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、

粉塵を吸入しないこと。

- ・使用後は、感染性の汚染が考えられる場合は医療廃棄物として、汚染のない場合は産業廃棄物として廃棄すること。
- ・本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外の人は使用しないこと。

2) その他の注意

本書の記載内容は、作成/改訂時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、新しい知見により改訂することがあります。

**【保管方法及び有効期間等】**

【保管方法】

- ・多湿な場所や、腐食性薬剤の蒸気等に暴露される場所を避け、荷重等の物理的負荷がかからないように保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の人が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売 株式会社トクヤマデンタル  
住所 〒314-0255茨城県神栖市砂山26  
電話番号 (フリーダイヤル) 0120-54-1182

製造 株式会社マシンツール中央

ご使用前に本書の  
使用上の注意をよく  
お読み下さい。