

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

トレフィットNP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造】

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸イソノニル／フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）を主材料とし、滑剤（パウダー）の付いていない手袋である。
形状：平手タイプ、表面仕上げ：P（平滑）

*【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る。

*【使用方法等】

上部取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

*【使用上の注意】

*1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす事がある。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し適切な処置を施すこと。

2. 重要な基本的注意

- 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。
- 油脂により材質が劣化する場合があるので、確認の上、注意して使用すること。
- この手袋の素材であるポリ塩化ビニルは、60℃以上の熱に弱い材料のため熱いものに触れないこと。
- 可塑剤（フタル酸イソノニル／フタル酸ジ（2－エチルヘキシル））が溶出する場合があるので注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

*1. 有効期間

- 製造年月日より 3 年〔自己認証による〕
（製造年月日は欄外に記載）。

*＜保管の条件＞

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

**製造販売元：東レ・メディカル株式会社
TEL : 03-6262-3823