

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

トレフィットNP (滅菌済)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸イソノニル/フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を主材料とし、滑剤(パウダー)なしの手袋である。

形状:前指型、表面仕上げ:P(平滑)

**【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する滅菌済の使い捨て形式のビニル手袋である。

**【使用方法等】

- 1.包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出す。
- 2.台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して無菌的に装着する。

**【使用上の注意】

**1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす事がある。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し適切な処置を施すこと。

2. 重要な基本的注意

- 万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

- 油脂により材質が劣化する場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

- この手袋の素材であるポリ塩化ビニルは、60℃以上の熱に弱い。ため熱いものに触れないこと。

- 可塑剤(フタル酸イソノニル/フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))が溶出する場合があるので注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】

**1. 有効期間

- *●製造年月日より3年[自己認証による]
(製造年月日は欄外に記載)。

**<保管の条件>

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元: 東レ・メディカル株式会社
TEL: 03-6262-3822

04A