

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

検査用手袋 センシタッチ・ニトリルNP（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（ニトリルブタジエンゴム）を主材料とし、滑剤（パウダー）の付いていない手袋である。

形状：平手タイプ、表面仕上げ：T（粗面）

**【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る。

**【使用方法等】

手袋取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

**【使用上の注意】

**1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎（Ⅳ型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）の症状がでる恐れがある。また、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこす事がある。このような症状が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師に相談すること。

2. 重要な基本的注意

- 万一、製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】

**1. 有効期間

- 製造より3年〔自己認証による〕（使用期限は本品の包装に記載）

**＜保管の条件＞

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売元：東レ・メディカル株式会社

TEL: 03-6262-3822