

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

ニトリル検査用手袋ノーパウダー T (未滅菌)

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（アクリロニトリルブタジエンゴム）を主材料とし、滑剤（パウダー）の付いていない未滅菌の使い捨て形式の手袋である。

形状：平手タイプ、表面仕上げ：T（粗面）

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋である。

【品目仕様等】

- 促進老化前 引張強さ 14.0 MPa 以上
切断時伸び 500%以上
- 促進老化後 引張強さ 14.0 MPa 以上
切断時伸び 400%以上

ただし、促進老化条件は、70℃、166±2 時間である。

【操作方法又は使用方法等】

上部手袋取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎（Ⅳ型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）の症状がでる恐れがある。また、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす事がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

2. 重要な基本的注意

- 万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると、破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。

3. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。

2. 使用の期限

- 製造年月より 3 年 [自己認証による] (使用期限は本品の包装に記載)。

【包装】

100 枚／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売元：東レ・メディカル株式会社
東京都中央区日本橋本町 2-4-1
TEL：03-6262-3833

外国製造元：ハータレガ エスディーエヌ ビーエイチディー
Hartalega Sdn. Bhd. (マレーシア)

*連絡先：東レ・メディカル株式会社
医療用具事業部門 マーケティング室
東京都中央区日本橋本町 2-4-1
TEL：03-6262-3822