

医療用品3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

トレフィット・ニトリル(NP)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

●薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるので、確認の上、注意して使用すること。

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（アクリロニトリルブタジエンゴム）を主材料とし、滑剤（パウダー）の付いていない未滅菌の使い捨て形式の手袋である。

形状：平手タイプ、表面仕上げ：T（粗面）

**【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋である。

**【使用方法等】

上部手袋取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

**【使用上の注意】

**1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎（IV型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加物の化学物質による）の症状がでる恐れがある。また、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

2. 重要な基本的注意

- 万一、製品が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると、破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】

**1. 有効期間

- 製造年月日より5年〔自己認証による〕
（製造年月日は本品の包装に記載）。

**＜保管の条件＞

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

※ 製造販売元：東レ・メディカル株式会社

TEL：03-6262-3822