

機械器具 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用手袋 38364000

放射線防護用手袋トレフィット・X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（ポリイソプレン）に炭化タングステンと二酸化エルビウムを混和した、滑剤（パウダー）の付いていない滅菌済みの使い捨ての放射線防護用手袋である。放射線遮蔽率の違いにより、モデル1とモデル2の2タイプがある。

タイプ別指先厚み(mm)と放射線遮蔽率(%)

タイプ	指先厚さ (mm)	EN61331-1 医療用放射線遮蔽率			
		X線管電圧			
		60kV	80kV	100kV	120kV
モデル1	0.22以上	52%	44%	40%	36%
モデル2	0.30以上	61%	54%	46%	42%

【使用目的又は効果】

使用者の手の全体を診断及び治療措置に関連した放射線による不必要な被曝から保護するために使用する。

【使用方法等】

上部手袋取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

●製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎（IV型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加物の化学物質による）の症状がでる恐れがある。また、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

2. 重要な基本的注意

- 万一、製品が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切に処分すること。
- 刃物等鋭利な器具に触れると、破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、確認の上、注意して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 有効期間

- 本品の包装に記載【自己認証による】
<保管の条件>
- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売元：東レ・メディカル株式会社
TEL：03-6262-3823