

器具器械(50)開創又は開孔用気具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡(70948009)
ウェルチアリン ファイバーオプティック喉頭鏡

【警告】

- ・医師または訓練を受けた方以外での使用はしないでください。
- ・ブレードを漂白剤、過酸化水素液、ポビドンヨードに浸さないでください。
- ・ハンドルを液体中に浸さないでください。また、滅菌は行わないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品を、他社のアクセサリと併用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

(ブレード)

品番	仕様
69061～69064	マッキントッシュ・ブレード
69211～69214	イングリッシュマッキントッシュ・ブレード
68060～68065	ミラー・ブレード

(ハンドル)

60813	スタンダード(単2電池用、充電電池用)
60814	スリム(単3電池用)
60815	ショート(単3電池用)

2. 寸法及び質量

(ハンドル)

60813	寸法	L=約152mm×Φ=約28mm
	重量	約 320g(電池含む)
60814	寸法	L=約155mm×Φ=約18mm
	重量	約 210g(電池含む)
60815	寸法	L=約111mm×Φ=約32mm
	重量	約 210g(電池含む)

(ブレード)

品番	ブレード長	品番	ブレード長
69061	63mm	69214	140mm
69062	85mm	68065	36mm
69063	101mm	68060	53mm
69064	136mm	68061	80mm
69211	70mm	68062	133mm
69212	90mm	68063	172mm
69213	115mm	68064	182mm

3. アクセサリ

品番 6000 予備電球

4. 動作原理

ハンドル内部にある電球からでた光は、光ファイバーを介して集光し、ブレード先端部より照射される。

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具。喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。ハンドル、ブレードから成り、照明装置を内蔵するものもある。

【品目仕様等】

電球定格: 2.5V

【使用方法等】

- 1 ハンドルに電池を入れ、底部カバーをします。
- 2 ハンドル上部にブレードを装着します。ハンドル内の電球が点灯し、照光します。ブレードを取り外しますと消灯します。

【使用上の注意】

- ・電池の交換時には、電池の方向性をご確認ください。
- ・ウェルチアリン社のランプのみを使用してください。他社のランプを使用すると、ネジ山や電気的な接触を損なうことがあります。
- ・乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。
- (オキシライド乾電池は初期電圧が高いため使用しないでください)

【保管方法及び有効期間等】

- ・長期間使用しないときは、電池をハンドルから取り出し保管してください。
- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

(電池交換)

- 1 ハンドルの底面カバーを反時計回りに廻してゆるめ、外してください。
- 2 電池が取り出せます。
- 3 新しい電池の方向性を確認して、ハンドルに入れてください。
- 4 ハンドルの底部カバーを時計回りに廻し、しっかりと締めてください。

(ランプ交換)

- 1 ハンドルの底面カバーを外し、電池を取り出してください。
- 2 ランプホルダーカートリッジはハンドル中に残っています。
- 3 ランプが完全に冷えてから指で押して取り外してください。
- 4 ホルダーから外部カバーを外し、次にランプを外してください。
- 5 ランプを新しい電球と交換してください。
- 6 ハンドル中のランプホルダーカートリッジを交換する際には、ハンドルを逆さまにしてください。次に、ハンドルの内部でカートリッジをゆっくり下向きにスライドさせてください。
- 7 ホルダーの先が上部開口部からでてくるまで、左右に振ってください。
- 8 電池を入れて、カートリッジが適正な場所に入るまで押してください。
- 9 底部カバーを閉めてください。

－クリーニング－

使用後すぐに、流水でブレードの残余物を取り除いてください。次に、光ファイバーパイプをブレードからはずします。光パイプとブレードは、軟らかいブラシを使って石けん水中で軽くすすってください。光パイプとブレードを十分に水洗いして、乾燥し、消毒あるいは滅菌前に組み立ててください。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

製造業者

ウェルチ・アリン社 Welch Allyn Inc
アメリカ合衆国 ニューヨーク州

取扱説明書を必ずご参照ください。