

器具器械(50)開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡(JMDN70948009)
リースター ファイバーオプティック喉頭鏡(マッキントッシュ)

【警告】

- ・医師または訓練を受けた方以外のご使用は避けてください。
- ・定められた規格の乾電池をご使用下さい。また、乾電池の+、-の方向性にご注意ください。
- ・ハンドルを液体中に浸さないでください。
また滅菌は行わないでください。
- ・本製品を超音波クリーニング、フラッシュオートクレーブ及び熱風による滅菌は行わないで下さい。

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・本製品を、他社アクセサリーの併用を避けてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本製品は以下の構成からなる。

ハンドル

ブレード(マッキントッシュ型)

2. 寸法及び質量

ハンドル

- 12306 喉頭鏡ハンドルスリム L=155mm Φ18mm 重量200g
12305 喉頭鏡ハンドルC L=153mm Φ29mm 重量340g
12309 喉頭鏡ハンドルショート L=153mm Φ32mm 重量210g

ブレード

- 12230 マッキントッシュブレード リ・インテグラルNo.0 L=58mm
12231 マッキントッシュブレード リ・インテグラルNo.0 L=72mm
12232 マッキントッシュブレード リ・インテグラルNo.0 L=93mm
12233 マッキントッシュブレード リ・インテグラルNo.0 L=114mm
12234 マッキントッシュブレード リ・インテグラルNo.0 L=132mm
12235 マッキントッシュブレード リ・インテグラルNo.0 L=155mm
12260 マッキントッシュブレード リ・モジュールNo.0 L=58mm
12261 マッキントッシュブレード リ・モジュールNo.1 L=72mm
12262 マッキントッシュブレード リ・モジュールNo.2 L=93mm
12263 マッキントッシュブレード リ・モジュールNo.3 L=110mm
12264 マッキントッシュブレード リ・モジュールNo.4 L=130mm
12272 マッキントッシュブレード リ・モジュールNo.5 L=150mm

3. 動作原理

ハンドル内の電球からでた光は、光ファイバーを介してブレード先端部より照射される。

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具。
喉頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。
ハンドル、ブレードから成り、照明装置を内蔵する。

【品目仕様等】

電球定格: 2.5V

【操作方法又は使用方法等】

1. ハンドルの上端部にあるレールにブレードをはめ込み、ブレードの後部が水平になりカチッという音がするまでブレード前部を引き上げます。
2. ブレードとハンドルがかみ合うことでランプが点灯します。
3. ブレードを折りたたむ(取り外す)ことで消灯します。

【使用上の注意】

- ・長時間本製品を使用しない場合または、移送中はハンドルから乾電池を取り外してください。
- ・最大輝度を確保する為に、交換時には必ず新しい高品質の乾電池を挿入することをお勧めします。

【保管方法及び有効期間等】

長期間本製品を使用しないときは、ハンドルから乾電池を取り出し、金属製品と接触を避け、高温、多湿の場所を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 電球交換

本製品の使用直後の電球交換は、電球とその周辺部が高温になっている場合がありますので、十分冷却してから電球を交換してください。

-電球交換の手順-

- ① ハンドルの上端部を反時計回りに回し取り外します。
- ② ハンドル上端部にランプソケットが見えますので
ランプソケットの刻み部分を回し引き出します。
- ③ ランプソケットから緑色のカバーを回し取り外します。
- ④ 電球を回し取り外します。
- ⑤ 新しい電球と交換します。

2. クリーニング

- ① ハンドルは、お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。本製品は防水性ではありませんので、液体への浸漬はおこなわないでください。
- ② ブレードは、お湯やアルコールを湿らせた布による清拭クリーニングが可能です。
- ③ ブレードの滅菌は、134℃で蒸気滅菌剤を使用して10分の滞留時間で滅菌することが可能です。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F
TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

リースター社 Rudolf Riester GmbH
ドイツ