

作成年月日: **2015年2月10日(第4版)

*2008年3月31日(第3版)

医療機器届出番号: 28B2X00002002001

器具器械(25)医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ(32692000)
ハマト手術用双眼ルーペ

【禁忌・禁止】

- ・本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。
- ・医師または訓練受けた方以外のご使用は避けてください。
- ・超音波洗浄機、中性洗剤は使用不可。故障の原因となります。

【形状・構造及び原理等】

1.構成

本品は以下の構成(組合せ)からなる。

フレーム

鏡筒(倍率:2.5倍用、3.0倍用)

(焦点距離:480mm用、380mm用、260mm用)

2.寸法及び重量

(寸法) 145mm * 150mm

(重量) 倍率2.5倍の鏡筒の場合-54g

倍率3.0倍の鏡筒の場合-77g

3.原理

鏡筒部の拡大レンズにより、視野を拡大する。

【使用目的又は効果】

患者の診断、処置、手術まで使用できる小型望遠鏡としての機能をもつ機器。

【品目仕様等】

仕様

(倍率) 2.5倍、3.0倍

(焦点距離) 480mm、380mm、260mm

(瞳孔距離) 48mm～80mm

【使用方法等】

- ・使用目的に合った、倍率・焦点距離の鏡筒をフレームに装着する。
- ・鏡筒を摺動させ、瞳孔の距離を調整する。
- ・使用時の姿勢に合わせて、フレームヒンジ部を可動させ鏡筒の角度を調整する。

【使用上の注意】

- ・落下させたり、硬いものに当てない。
- ・レンズ面には、指紋など付けないようにする。

【保管方法及び有効期間等】

- ・常温による保管
- ・湿度の少ない所で保管。

【保守・点検に係る事項】

- ・レンズ表面にホコリ・ゴミなどが付着した場合はハケやブローアで優しく除去すること。
- ・指紋、油などの汚れが付着した場合は、上記処理後、レンズクリーニングペーパーまたはきれいな布や綿棒などにエーテルアルコール、またはこの混合液をつけ、軽く拭き取る。
- ・中性洗剤、ガラスコップ用洗剤の試用は避けてください。それらの洗剤にはコーティング剤が入っている場合がありますので、それらを使用すると乱反射が発生する可能性があります。

【主要文献及び文献請求先】

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055

(製造業者)

日本ライト株式会社

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-1-15 廣栄ビル3F

TEL 078-231-8731 FAX 078-231-8055